


STAALAFNAME voor IGRA (Quantiferon TB-Gold)

voorbereiding	<ul style="list-style-type: none">• De TB Quantiferon tubes zijn te bekomen op het labo	
staalafname	<p>enkel op wekdagen</p> <ul style="list-style-type: none">• Collecteer 1 ml veneus bloed in elk van de 4 Quantiferon tubes (zwart streepje op tube duidt het juiste volume aan). Aangezien de 1 ml tubes relatief langzaam vullen, hou je de tube best nog 2 à 3 sec langer op de naald nadat het lijkt alsof het gewenste niveau is bereikt.• Zwenk de tubes onmiddellijk na afname 10x. Doe dit krachtig genoeg zodat dat de hele binnenwand van de tube in contact is gekomen met het bloed. Te krachtig schudden kan echter de gel verstoren en afwijkende testresultaten geven!• Identificeer na de bloedafname alle tubes met naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt.	
staaltransport	<ul style="list-style-type: none">• Breng de tubes onmiddellijk na de bloedafname naar het labo. De tubes mogen NIET via de BUIZENPOST verzonden worden (delicate, gecoatete tubes!).	