



Uitgevaardigd door: cel ZORG (03/04/2020)

Reinigen en ontsmetten van spatbrillen en face shields

- **Spatbrillen:** beschermen je oogslijmvlies tegen spatten van lichaamsvochten
- **Face shields:** gelaatsbeschermers te gebruiken bij aërosolgenererende handelingen, door zorgverstreker en assistent

1. Algemene principes

- De spatbrillen en face shields zijn eigendom van het ziekenhuis en zijn niet persoonsgebonden.
- De spatbrillen en face shields kunnen tijdens een shift persoonsgebonden gebruikt worden.
- De spatbrillen en face shields zijn herbruikbaar.
- Tussendoor wordt zichtbare bevuilding verwijderd (dit kan met water en zeep).
- Dagelijks wordt het ganse voorwerp gereinigd en ontsmet.
- De spatbrillen en face shields worden bij defecten verwijderd via het NRMA.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van reiniging en ontsmetting.

2. Meteen na elk gebruik

- Controleer de spatbril en/of face shield na elk gebruik.
- Zichtbare bevuilding wordt gereinigd: dit kan d.m.v. water en zeep of Clinell Universal wipes/spray.
- De spatbril of face shield blijft in de vuile zone.

3. Dagelijkse reiniging en ontsmetting

- Reiniging en ontsmetting van spatbrillen en face shields: dit kan a.d.h.v. Clinell Universal wipes en spray (contacttijd 1 minuut).
- In geval van strepen op het scherm bij gebruik van Clinell: gebruik ethanol 70% en een zachte niet-absorberende doek. Respecteer een contacttijd van 30 seconden en laat drogen aan de lucht.